

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE TRICHINELLOSIS

UN BUEN DIAGNÓSTICO COMIENZA CON UNA CORRECTA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

Diagnóstico de Trichinellosis por la técnica de Digestión Enzimática

- Las muestras deberán ser **individuales**, de cada cerdo, correctamente identificadas (aclarando sexo del animal, peso y lugar de toma de muestra).
- Cantidad de muestra: de cada cerdo se deberá tomar al menos **100 gramos** de muestra.
- Los músculos indicados para un eficaz diagnóstico son:
 - ✓ Entraña,
 - ✓ Intercostal,
 - ✓ Masetero o de la quijada,
 - ✓ Músculos de la garganta.
- La muestra puede estar constituida por un solo tipo de músculo o una mezcla de los antes mencionados.
- **Conservar la muestra en la heladera desde el momento en que fue tomada hasta su envío al laboratorio (NO congelar).**

